



LINER LS3M10

SILICON LINER

SILICON LINER

silicón

Liner LS3M10 es fabricado en gel de silicona de grado médico de 3 mm de espesor, suave con la piel, confortable 100% para el miembro residual, higiénico e hipoalérgico, con cubierta de tela sin costura.

Fácil de enrollar y desenrollar por la superficie lisa del recubrimiento de tejido. Los liner LS3M10 son para uso en prótesis de extremidad inferior con matriz de 10 cm, adecuado para uso en muñón cónico o cilíndrico.

Por sus características mantiene una alta adherencia del silicón con la piel brindando una gran comodidad. Distribución de presión perfecta del textil para colocarse fácilmente, contribuye a una reducción del pistoneo por la matriz.

Liner para conexión distal para uso con pin auto suspendible, compatible con todas las lanzaderas O and P México.

PRECAUCIÓN

No exponga el liner a objetos punzocortantes, afilados, o uñas largas, ya que podrían comprometer la integridad del silicón y por lo tanto crear cortes en la anatomía del liner.

El paciente debe tener cuidado al momento de colocar el liner, sobre todo si se tiene el pin puesto en el área distal, ya que esto representa un riesgo y podría perforar el liner si no se tiene la precaución necesaria.



GRADO DE MOVILIDAD



MOVILIDAD

1-3

CLAVE

LS3M10

GARANTÍA

Solamente se podrá garantizar, si el producto se emplea las condiciones descritas en los anteriores renglones y en el instructivo anexo.

Este producto es garantizado por 6 meses únicamente contra defectos de fabricación, la anterior aplica exclusivamente si se presenta la carta de solicitud de garantía (LSM) y sean entregadas las evidencias descritas en el documento.

SILICON LINER

Para determinar la talla correcta del liner se mide una circunferencia a los 4 cm por encima del extremo distal del muñón.¹

Seleccione la talla en base al dato obtenido procurando que sea exactamente el mismo de la circunferencia o el siguiente más pequeño.


MEDIDA

| MEDIDAS DE LINERS (CM) | CLAVE |
|------------------------|------------|
| 18 | LS3M10=180 |
| 20 | LS3M10=200 |
| 21 | LS3M10=210 |
| 22 | LS3M10=220 |
| 23.5 | LS3M10=235 |
| 25 | LS3M10=250 |
| 26.5 | LS3M10=265 |
| 28 | LS3M10=280 |
| 30 | LS3M10=300 |
| 32 | LS3M10=320 |
| 34 | LS3M10=340 |
| 36 | LS3M10=360 |
| 38 | LS3M10=380 |
| 40 | LS3M10=400 |
| 42 | LS3M10=420 |
| 45 | LS3M10=450 |

IMPORTANTE !

Tener cuidado al momento de cortar el liner, se deben utilizar las tijeras onduladas ya que son especiales para el material.

Un mal corte del liner puede causar la pérdida de la garantía.

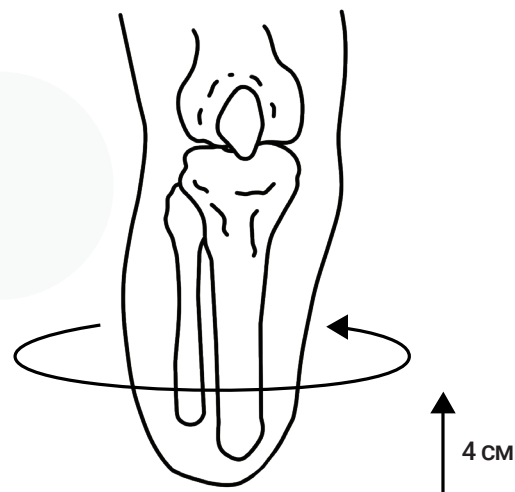

1

GRADO DE MOVILIDAD



MOVILIDAD

1-3

CLAVE

LS3M10