



LINER LS6SCD

SILICON LINER

SILICON LINER

silicón

El liner LS6SCD es fabricado en gel de silicona de grado médico de 6 mm de espesor, suave con la piel, confortable 100% para el miembro residual, higiénico e hipoalergénico, con cubierta de tela sin costura.

Fácil de enrollar y desenrollar por la superficie lisa del recubrimiento de tejido. Los liner LS6SCD son para uso en prótesis de extremidad inferior, con matriz integrada de 10 cm, adecuado para uso en muñón cónico o cilíndrico.

Por sus características mantiene una alta adherencia del silicón con la piel brindando una gran comodidad. Distribución de presión perfecta del textil para colocarse fácilmente, contribuye a una reducción del pistoneo por la matriz.

Liner sin conexión distal para uso en técnica de vacío para encaje (VST).

PRECAUCIÓN

No exponga el liner a objetos punzocortantes, afilados, o uñas largas, ya que podrían comprometer la integridad del silicón y por lo tanto crear cortes en la anatomía del liner.

El paciente debe tener cuidado al momento de colocar el liner, sobre todo si se tiene el pin puesto en el área distal, ya que esto representa un riesgo y podría perforar el liner si no se tiene la precaución necesaria.



GRADO DE MOVILIDAD



MOVILIDAD

1-3

CLAVE

LS6SCD

GARANTÍA

Solamente se podrá garantizar, si el producto se emplea las condiciones descritas en los anteriores renglones y en el instructivo anexo.

Este producto es garantizado por 6 meses únicamente contra defectos de fabricación, la anterior aplica exclusivamente si se presenta la carta de solicitud de garantía (LSM) y sean entregadas las evidencias descritas en el documento.

SILICON LINER

Para determinar la talla correcta del liner se mide una circunferencia a los 4 cm por encima del extremo distal del muñón.¹

Seleccione la talla en base al dato obtenido procurando que sea exactamente el mismo de la circunferencia o el siguiente más pequeño.


MEDIDA

MEDIDAS DE LINERS (CM)	CLAVE
18	LS6SCD=180
20	LS6SCD=200
21	LS6SCD=210
22	LS6SCD=220
23.5	LS6SCD=235
25	LS6SCD=250
26.5	LS6SCD=265
28	LS6SCD=280
30	LS6SCD=300
32	LS6SCD=320
34	LS6SCD=340
36	LS6SCD=360
38	LS6SCD=380
40	LS6SCD=400
42	LS6SCD=420
45	LS6SCD=450

IMPORTANTE !

Tener cuidado al momento de cortar el liner, se deben utilizar las tijeras onduladas ya que son especiales para el material.

Un mal corte del liner puede causar la pérdida de la garantía.

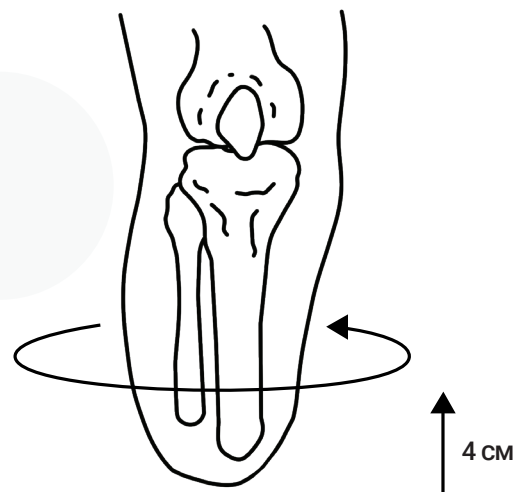

1

GRADO DE MOVILIDAD



MOVILIDAD

1-3

CLAVE

LS6SCD