



LINER LSAM10

ALOE FRESH

ALOE FRESH

silicón

El liner AloeFresh es fabricado en gel de silicona de grado médico con una capa interna de 5 micras de aloe vera, que proporciona frescura y una menor sensación térmica ayudando así a las pieles sensibles, 100% confortable para el miembro residual, higiénico, con cubierta de tela sin costura.

Los liner LSAM10 son para uso en prótesis de extremidad inferior, con matriz de 10 cm, brindando una gran comodidad.

Por sus características mantiene una alta adherencia del silicón con la piel. Distribución de presión perfecta del textil para colocarse fácilmente, contribuye a una reducción del pistoneo por la matriz.

Liner para conexión distal para uso con pin auto suspendible, compatible con todas las lanzaderas O and P.

PRECAUCIÓN

No exponga el liner a objetos punzocortantes, afilados, o uñas largas, ya que podrían comprometer la integridad del silicón y por lo tanto crear cortes en la anatomía del liner.

El paciente debe tener cuidado al momento de colocar el liner, sobre todo si se tiene el pin puesto en el área distal, ya que esto representa un riesgo y podría perforar el liner si no se tiene la precaución necesaria.



GRADO DE MOVILIDAD



MOVILIDAD

1-3

CLAVE

LSAM10

GARANTÍA

Solamente se podrá garantizar, si el producto se emplea las condiciones descritas en los anteriores renglones y en el instructivo anexo.

Este producto es garantizado por 6 meses únicamente contra defectos de fabricación, la anterior aplica exclusivamente si se presenta la carta de solicitud de garantía (LSM) y sean entregadas las evidencias descritas en el documento.

ALOE FRESH


Para determinar la talla correcta del liner se mide una circunferencia a los 4 cm por encima del extremo distal del muñón.¹

Seleccione la talla en base al dato obtenido procurando que sea exactamente el mismo de la circunferencia o el siguiente más pequeño.



MEDIDA

MEDIDAS DE LINERS (CM)	CLAVE
23.5	LSAM10=235
25	LSAM10=250
26.5	LSAM10=265
28	LSAM10=280
30	LSAM10=300
32	LSAM10=320
34	LSAM10=340
36	LSAM10=360
38	LSAM10=380
40	LSAM10=400
42	LSAM10=420
45	LSAM10=450

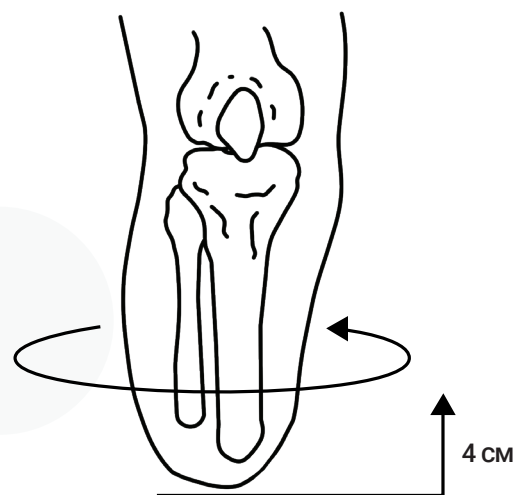

1

IMPORTANTE !

Tener cuidado al momento de cortar el liner, se deben utilizar las tijeras onduladas ya que son especiales para el material.

Un mal corte del liner puede causar la perdida de la garantía.

GRADO DE MOVILIDAD



MOVILIDAD

1-3

CLAVE

LSAM10